



Sillon prémaxillaire

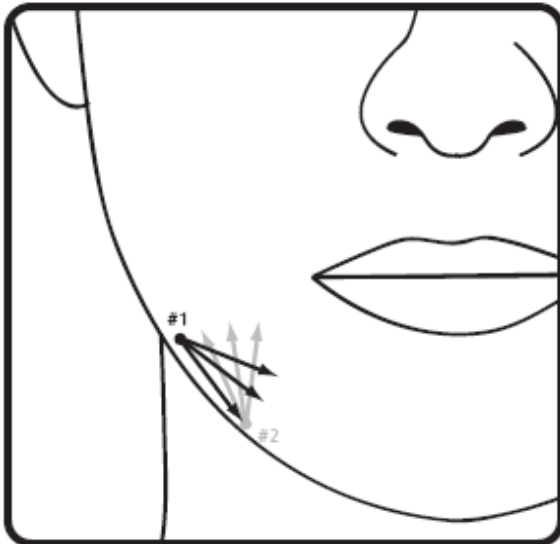

- ⇒ Nettoyez la zone à traiter avec une solution antiseptique appropriée.
- ⇒ Perfectha Derm® Subskin peut être administré avec une aiguille ou une canule (recommandations : **22G - 50mm***)
- ⇒ Avant de commencer le traitement, évaluez le besoin d'une anesthésie qui peut être sous forme topique, sous forme locale (blocage nerveux) ou par infiltration directe dans le tissu sous-cutané..
- ⇒ Marquez la zone à traiter ; par exemple à l'aide d'un crayon de maquillage. Le patient devra être en position droite.
- ⇒ Avant de commencer l'application, poussez soigneusement le piston jusqu'à ce qu'une goutte de produit apparaisse au bout de la canule ou de l'aiguille, de manière à la purger complètement de son air.
- ⇒ En cas d'utilisation d'une canule, réalisez une pré-incision à l'aide d'une aiguille de même diamètre ou de diamètre plus grand que la canule (recommandation : 20G à 22G).

Augmentation du menton

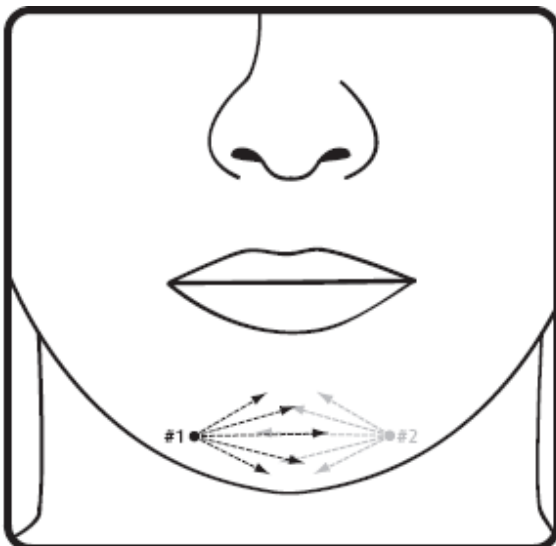

- ⇒ La technique idéale d'application pour Perfectha Derm® Subskin est la technique de rétro-injection ou la technique du bolus. Pendant l'application, il est recommandé que l'orifice de la canule ou de l'aiguille soit tourné vers le haut. Injecter lentement l'implant Perfectha Derm® Subskin par le point d'insertion n°1, tout en retirant la canule ou l'aiguille.
- ⇒ Dans le cas de la technique de rétro-injection, utilisez la technique de l'éventail (« fanning »), comme indiqué sur les schémas, pour faciliter le rehaussement et le soutien de la zone.
- ⇒ Procédez de la même façon avec le point d'insertion n°2
- ⇒ Interrompez immédiatement l'injection avant que la canule ou l'aiguille soit entièrement retirée de la peau afin d'éviter le débordement du produit sur la zone d'application.
- ⇒ Massez légèrement la zone traitée pour que le produit s'adapte aux tissus sous-jacents.
- ⇒ Appliquez des compresses d'eau glacée sur la zone traitée.